


R110終了方法


機器上部にある、「operation」スイッチを長押し(3秒以上押し続けます)。

カウントが表示されます。

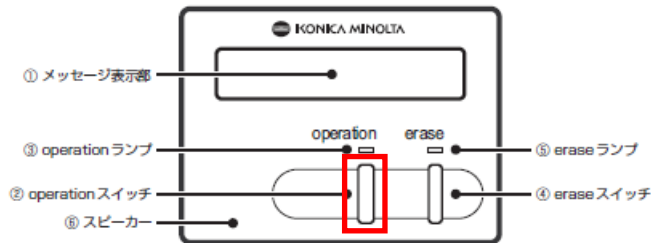

「operation」スイッチを押し続けている間、メッセージ表示部に「パワーOFFマデ3」「2」「1」カウントが表示されます。


カウントの数字が1になる前に「operation」スイッチから指を離すと、カウントダウンは中止され、メッセージ表示部の表示は、「READY」に戻ります。

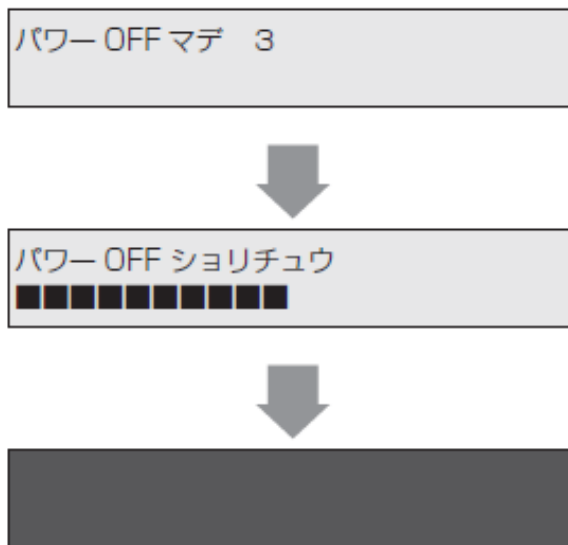


R110が終了します。

R110起動方法

機器上部にある、「operation」スイッチを押して起動します。

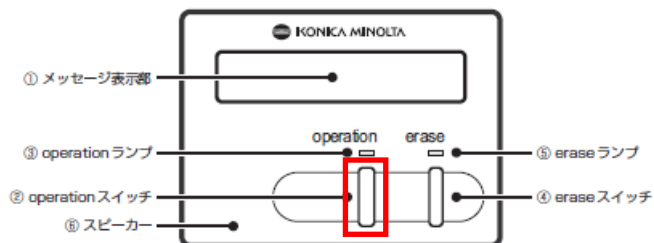

機器が起動し、初期化が実行されます。
メッセージ表示部に「INITIALIZING」というメッセージと初期化動作の進行状況を示すカウントバー「■■■■■■□□□□」が表示されます。
初期化が完了すると、メッセージ表示部に「READY」と表示され、操作が可能になります。

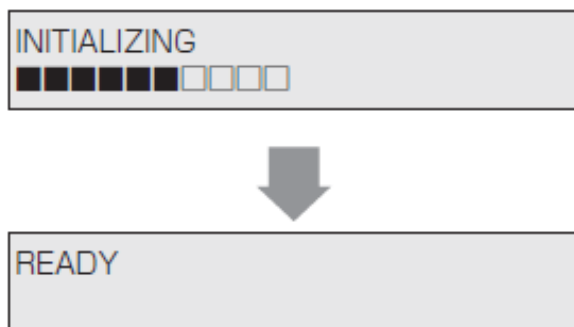

コンソール側 Regius UNITEA、CS-2/3/5が起動していない場合、ネットワークエラーが表示される場合があります。