


UNITEA停電時の対応について

計画停電に伴い、UNITEAの電源を切る場合は、以下の手順にてお願いします。

ビューワー画面または、患者受付画面右上の【×】ボタンをクリックします。

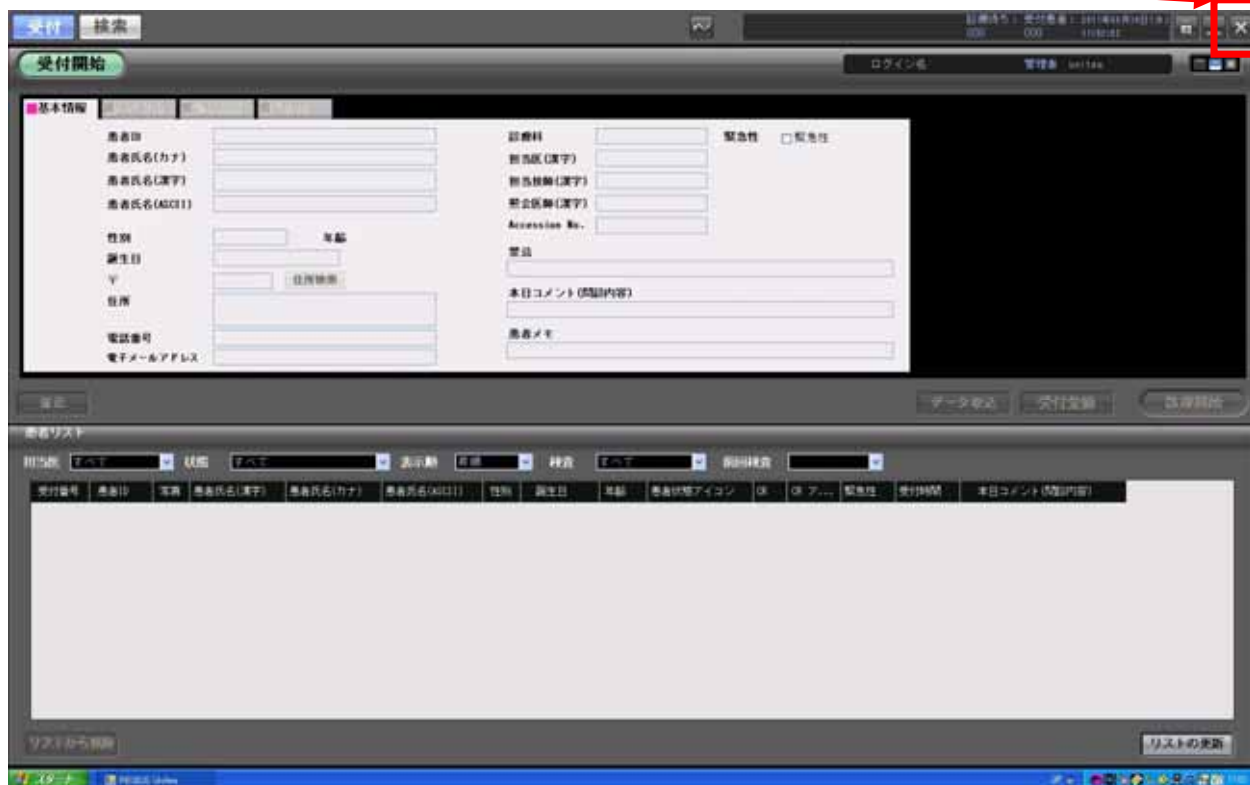

ビューワー画面が表示されていてモダリティボタンが押されていた場合は、自動的に解除されます。

確認画面の後、OSのデスクトップ画面が表示されます。

スタートメニューから【終了オプション(U)】 【電源を切る(U)】を順にクリックしてください。
REGIUS Uniteaの電源が切れます。
Uniteaの電源が切れましたら、REGIUS110の電源OFFをお願いします。

UNITEAの起動方法

本体正面の起動SWを押し起動させてください。

UNITEAのログイン画面が表示されますのでログインを実行してください。



ログイン画面

KONICA MINOLTA

REGIUS
Unitea
Ver.1.41R03

ID : unitea

Password :

キャンセル ログイン

UNITEAの起動を確認したら、REGIUS110を起動してください。