



KONICA MINOLTA

2020年6月10日

お客様各位

コニカミノルタ株式会社  
ヘルスケア事業本部

平素はコニカミノルタ社製医療機器をご愛顧賜わりまして厚く御礼申し上げます。  
この度、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大により、多くのお問い合わせを頂いております。  
弊社 DIRECT DIGITIZER REGIUS システムの消毒方法について、ご案内致します。

## DIRECT DIGITIZER REGIUS システムの消毒に関するご案内

### ■対象機種

REGIUS Σ、カセット  
REGIUS Σ2、カセット  
REGIUS MODEL 110、カセット  
REGIUS MODEL 210、カセット

### ■使用可能な消毒薬剤および消毒手順

#### 【カセットの消毒】

- 消毒に使用する消毒液は、消毒用エタノール液、またはイソプロパノール液を使用して下さい。
- 消毒液をカセットに直接かけたり、スプレーで噴きかけたりすると、外装のすき間から浸入する恐れがあるため、不織布に少量を含ませて清拭して下さい。
- 消毒の必要なカセットは、リーダーに投入する前に消毒を行ってください。

#### 【リーダーの消毒】

- 糸くずの出ないやわらかい布に消毒用エタノール液、またはイソプロパノール液を含ませ、よく絞った状態で清拭してください。
- REGIUS MODEL 210 の場合、排出ゴムローラーにはアルコールなどの揮発性の消毒液は使用しないでください。ゴムが劣化し排出不良となる場合があります（REGIUS MODEL 210 取扱説明書 6.2.3）。

### ■注意事項

- 作業は本体装置の電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
- 消毒液は化学薬品であるため、薬品メーカーの取扱注意事項を守ってください。