

## DS-Me500

## インストールガイド

## はじめに

お買い上げ、ありがとうございます。  
データ解析ソフトウェア DS-Me500(以下、本ソフトウェアと記載します)は、パルスオキシメータ PULSOX-Me500(以下、本体と記載します)で測定したデータをパーソナルコンピュータに取り込み、パーソナルコンピュータ上でデータ解析を行うためのソフトウェアです。

## 本書に関するご注意

- 本書の内容の一部又は全部を無断で転載することは、法律で禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れ等でお気づきの点がございましたら、ご購入の販売店、または本書裏表紙に記載の連絡先にご相談ください。
- 本書の指示に従わず本ソフトウェアを使用した結果発生した事故については、上記に関わらず責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 本ソフトウェアの使用規定

- 本ソフトウェアのプログラムおよびマニュアル等ドキュメント類の著作権は、コニカミノルタ株式会社に帰属します。本ソフトウェアもしくはマニュアルの一部または全部をコニカミノルタ株式会社に無断で転用することは、著作権上固く禁じられております。
- 製品の仕様は、予告なく変更することがあります。
- 本ソフトウェアを使用することによる、いかなる損害につきましても、製造販売業者および販売業者の両社では、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。



## 注意 (CAUTION)

- ご使用前に本体やパーソナルコンピュータの取扱説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。取り扱いを誤ると、火災や感電の危険が生じる可能性が想定されます。

## メディアの使用及び保管に関する注意

- 本ソフトウェアには Windows は含まれておりません。パーソナルコンピュータに Windows システムをインストールしてからご使用ください。なお本書は、パーソナルコンピュータに Windows システムがインストールされていることを前提にして説明しています。
- インストールメディアを光学ドライブにセットするときは、正しい方向に、まっすぐ、無理なく入れてください。
- インストールメディアを汚したり傷をつけないでください。記録面に汚れやキズ、また、ラベル面にキズがあると、読み込みエラーの原因になります。
- CD-ROM の取り出しは、パーソナルコンピュータの電源がオンになっているときに行ってください。
- インストールメディアの使用後は、必ずケースに入れて、大切に保管してください。
- インストールメディアは、次のような場所で使用しないでください。
  - 屋外など環境が安定しない場所
  - 水を使用する場所の近く
  - 直射日光の当たる場所
  - ストーブなど発熱する器具の近く
  - 温湿度変化の激しい場所
  - 電氣的ノイズを発生する機器の近く (モーターの近くなど)
  - 強磁界を発生する機器の近く
  - 静電気の影響の強い場所
  - ごみ、ほこりの多い場所
  - 振動の多い場所
  - 結露の発生する場所
  - 揮発性の液体の近く
  - 腐食性ガス (亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど) や塩分を多量に含む空気が発生する場所

## 廃棄の仕方

- インストールメディアの廃棄に関しては、地域の自治体の規則にしたがってください。

## 準備

### 梱包内容

- ・インストールメディア 1 枚
- ・インストールガイド(本書) 1 冊
- ・簡単操作ガイド 1 部

本ソフトウェアの取扱説明書は、インストールメディア内に格納されています。

### 正式名称

本書で使用している商品名等の正式名称は、次のとおりです。

- ・Microsoft Windows 10 Pro(64bit)
- ・Microsoft Windows 10 Home(64bit)
- ・Microsoft Windows 11 Pro(64bit)
- ・Microsoft Windows 11 Home(64bit)

※本書では、Windows と総称して使用します。

### 商標について

- ・Microsoft, Windows は米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・その他、本書で使用している商品名等は、各社の商標です。

### 動作環境条件

#### 対応 OS(いずれも日本語 OS)

- ・Microsoft Windows 10 Pro(64bit)
- ・Microsoft Windows 10 Home(64bit)
- ・Microsoft Windows 11 Pro(64bit)
- ・Microsoft Windows 11 Home(64bit)
- ・パーソナルコンピュータのシステム構成については、上記 OS が推奨する構成 または下記の仕様のいずれか高いほうが必須条件となります。

#### パーソナルコンピュータの仕様 (モニター、マウス、キーボードを含む)

CPU : 2 GHz 以上のプロセッサ  
メモリー : 4 GB 以上  
記憶装置 : ハードディスクドライブ(空き容量 2 GB 以上を推奨)  
モニター : 1024 × 768(XGA) 以上  
その他 : 光学ドライブ 1 基<sup>※1</sup>(インストール用)  
USB 1ポート<sup>※2</sup>(本体との接続用) 以上

※1 光学ドライブとは、DVD ± Rドライブ、DVD-ROMドライブ、CD-ROMドライブのように、CD-ROMメディアに対応したドライブを指します。

※2 本体とパーソナルコンピュータを接続する際は、別売付属品 USB ケーブル UC-500a 1m を使用します。

# インストール

## 本ソフトウェアのインストール

次の手順に従って、本ソフトウェアをパーソナルコンピュータにインストールします。

- ・インストールを行う際は、管理者権限を持つユーザーでログインして作業を行ってください。
- ・起動している全てのソフトウェアを終了してからインストールしてください。

### インストール手順

- ・途中で、ユーザーアカウント制御を確認するメッセージ画面が表示されたら、[ はい ] を選択してください。

#### 1 パーソナルコンピュータの電源を入れ、Windows を起動します。

#### 2 パーソナルコンピュータの光学ドライブに、本ソフトウェアのインストールメディアをセットします。

#### 3 Windows のエクスプローラで CD ドライブを開き、setup.exe をダブルクリックして起動します。

- ・[DS-Me500 用の InstallShield ウィザードへようこそ] 画面が表示されたら、[ 次へ ] をクリックします。
- ・「使用許諾契約」画面が表示されます。

#### ヒント

- ・自動起動しない場合は、エクスプローラでインストールメディアにあるファイルの「Setup.exe」を実行してください。

#### 4 ライセンス契約書の内容を確認のうえ、[ 使用許諾契約の条項に同意します ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

- ・本ソフトウェアの使用許諾契約に関する書面が表示されます。内容をよく読み、同意される場合は [ 使用許諾契約の条項に同意します ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。
- ・[ ユーザー情報 ] 画面が表示されます。

#### ヒント

- ・同意されない場合は [ 使用許諾契約の条項に同意しません ] を選択し、[ キャンセル ] をクリックしてください。[DS-Me500 - InstallShield Wizard] 画面が表示され、インストールを中断するかどうかの確認メッセージが表示されますので、[ はい ] をクリックして中断してください。
- ・本ソフトウェアのインストールを進められた場合、本契約の内容に同意したものと見なされます。

#### 5 [ ユーザー名 ] と [ 所属 ] を確認し、[ 次へ ] をクリックします。

- ・[ セットアップタイプ ] 画面が表示されます。

#### 6 [ 完全 ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

- ・[ プログラムをインストールする準備ができました ] 画面が表示されます。

#### ヒント

- ・インストール先の初期設定は、ご使用されているパーソナルコンピュータのプログラムフォルダ内の Teijin フォルダにインストールされます。  
例) C:\Program Files (x86)\Teijin  
(ご使用のパーソナルコンピュータの環境によって、表示されるフォルダが異なる場合があります)
- ・[ カスタム ] を選択した場合、インストール先のフォルダを指定することができます。

#### 7 [ インストール ] をクリックします。

- ・インストールが開始されます。
- ・インストールが完了すると [ InstallShield ウィザードを完了しました ] 画面が表示されます。

#### ヒント

- ・インストールを中止したい場合は、[ キャンセル ] をクリックします。  
[DS-Me500 のインストールを中断してもよろしいですか?] のメッセージが表示されます。[ はい ] を選択するとインストールが中断され、インストールを中断した旨を知らせるメッセージの画面が表示されます。[ 完了 ] をクリックします。  
[DS-Me500 のインストールを中断してもよろしいですか?] のメッセージ画面で、[ いいえ ] を選択するとインストールを続行します。

#### 8 [ 完了 ] をクリックします。

- ・インストールが完了し、Windows のスタートメニューおよびデスクトップに、本ソフトウェアのショートカットが登録されます。

#### ヒント

- ・取扱説明書は、本ソフトウェアを起動した後、メニュー右上の [ ? ] - [ ヘルプ ] をクリックすると、デジタルデータが表示されます。

# アンインストール

## 本ソフトウェアのアンインストール

本ソフトウェアのアンインストールは、Windows 標準の手順で行います。

- ・アンインストールを行う際は、管理者権限を持つユーザーでログインして作業を行ってください。
- ・本ソフトウェアをアンインストールすると、インストール先のフォルダ、デスクトップおよびプログラムメニュー内に作成されたショートカットアイコンが消去されます。なお、インストール先のフォルダやデータフォルダに保存したデータは、アンインストールをしても消去される心配はありません。
- ・起動している全てのアプリケーションを終了してから、アンインストールしてください。

### アンインストール手順

- ・途中で、ユーザーアカウント制御を確認するメッセージ画面が表示されたら、[ はい ] を選択してください。

- 1 パーソナルコンピュータの電源を入れて、Windows を起動します。
- 2 スタートメニュー - [ 設定 ] - [ アプリ ] を選択します。
  - ・ [ アプリと機能 ] 画面が表示されます。
- 3 アプリの一覧から [ DS-Me500 ] を選択し、[ アンインストール ] をクリックします。
  - ・ [ このアプリとその関連情報がアンインストールされます。 ] のメッセージ画面が表示されます。
- 4 [ アンインストール ] をクリックします。
  - ・ アンインストールが開始されます。
  - ・ アンインストールが完了すると [ アプリと機能 ] 画面に戻ります。
  - ・ 本ソフトウェアがアプリの一覧から削除されていることを確認してください。

※本ソフトウェアの改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

連絡先

■販売業者

帝人ファーマ株式会社

100-8585 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 191-8511 東京都日野市さくら町1番地

■製造販売業者

コニカミルタ株式会社

ACM7BA02JA03

2025-01-15 (MA)