

始業点検表

■本器を装着する前に		
外観	ひび割れ、破損箇所はないですか。	稼動部、皮膚に接触する部分に認められる場合は使用を中止してください。
	電池蓋はしっかり閉まっていますか。	電池蓋をきっちりと閉めてください。
	汚れがないですか。	清掃してください。
	(プローブ) ケーブルが断線などの損傷を受けていませんか。	損傷があれば使用を中止してください。
装着部	発光部、受光部とも汚れ、傷はないですか。 (装着部内部を確認)	汚れがあれば清掃をしてください。
(指挿入部内側)	装着部の開閉動作に問題はないですか。	開閉動作に問題がある場合には使用を中止してください。
	装着時の保持力量(締め付け力)に問題はないですか。	著しく重い(きつい)、または軽い(ゆるい)場合や、他の同一商品と著しく差がある場合は使用を中止してください。
■基本動作確認		
電源	(Pulsox-1/Pulsox-2) 装着動作にて電源がON状態になりますか。	装着後/電源ボタン押し込み後、数秒経っても表示が現れない場合、または装着後1秒~2秒で、表示画面全点灯が現れ、その後測定値が数秒以内に表示されない場合には、電池について確認してください。
	(Pulsox-300/Pulsox-300i) 電源ボタンを押し込んで電源がON状態になりますか。	<ul style="list-style-type: none"> 電池の向きを確認 電池の状態を確認(発熱・液漏れ等) 電池の容量を確認 それでも動作しなければ使用を中止してください。
	全点灯状態の表示部に欠けはないですか。	欠けがある場合は使用を中止してください。
	測定中に発光部LEDは点灯していますか。 (装着部内部を確認)	点灯していなければ使用を中止してください。
	全点灯消灯後、電池警告も消灯しますか。	電池警告の点灯が残る場合は新しい電池に交換してください。
基本機能	健常者(医療者や家族)の指に装着した場合、脈波レベル、SpO2の測定値が表示されますか。	表示されない場合は使用を中止してください。
	健常者(医療者や家族)の指に装着した場合、表示されたSpO2値はおおむね正しいですか。	同一機種との数値比較で明らかな差があるなど、測定値に疑義がある場合は使用を中止してください。
	(被験者の状態によりますが、95%~100%の範囲内が目安です。)	
	健常者(医療者や家族)の指に装着した場合、脈波レベルメータの上下動のリズムが、脈拍と同期していますか。	同一機種との数値比較で明らかな差があるなど、測定値に疑義がある場合は使用を中止してください。
バックライト	(Pulsox-1/Pulsox-2) バックライトセンサをふさぐと、液晶表示部のバックライトが点灯しますか。 (ただし、電池警告が表示されているときは、バックライトは点灯しません。)	点灯しない場合、使用中止の必要はないですが、修理を推奨します。
	(Pulsox-300i) バックライトボタンを押すと液晶表示部のバックライトが約20秒間点灯しますか。	

終業点検表

本器を使用した後は、必ず以下の終業点検を行い、次回の使用に備えてください。

■終業時点検チェックリスト
液晶/LED表示部、発光部LEDの消灯を確認してください。 (Pulsox-1) 1分後に自動で電源がOFFになっていますか。/強制OFFで表示が消えますか。 (Pulsox-2) 10秒後に自動で電源がOFFになっていますか。 (Pulsox-300) 2分後に自動で電源がOFFになっていますか。/電源ボタンを押すと表示部・発光部LEDが消灯しましたか。 (Pulsox-300i) 電源ボタンを長押しすると表示部・発光部LEDが消灯しましたか。
使用中に何らかの異常は生じなかったですか。
清掃しましたか。(薬液を使用した場合は記録)
清掃後の本体が洗浄液等で濡れていないですか。(可動部等への浸みこみに注意)
電池を取り外しましたか。(2週間以上の長期使用予定がない場合) ※取り外した後、電池室内外観に異常のないことを確認してください。

点検後、装置の故障が考えられる場合は、ご購入の販売店、または取扱説明書の裏表紙に記載の連絡先にご相談ください。