


1 起動方法

CS-2制御部の【電源】スイッチを押します。

- ・電源ランプが緑色に点灯します。
- ・数分後、CS-2操作部に初期画面（画像確認画面、撮影登録画面、または撮影リスト画面）が表示されます。


CS-2が起動すると、REGIUS MODEL 170も自動的に起動します。

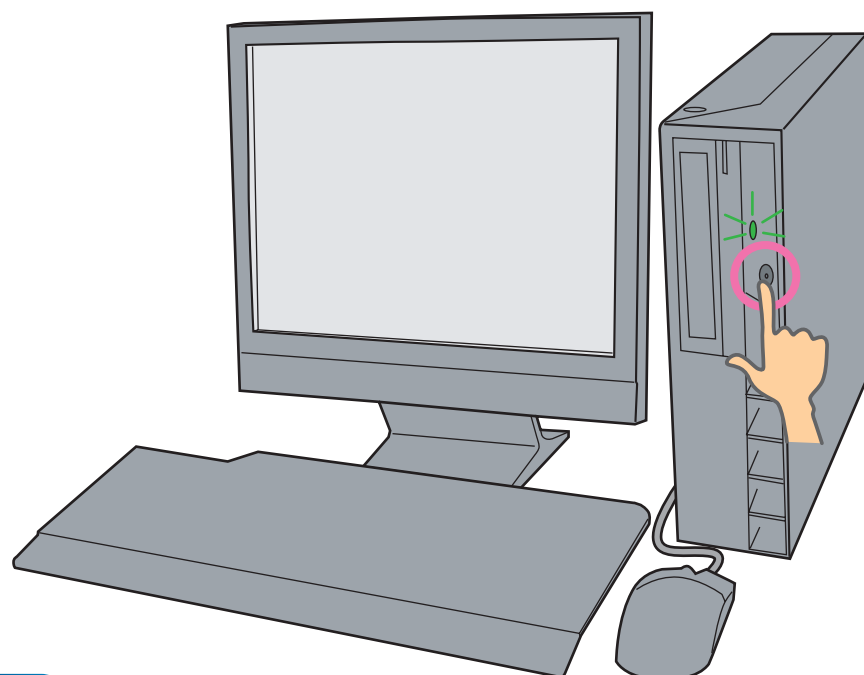

画像確認画面



撮影登録画面

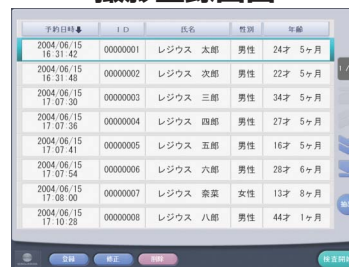


撮影リスト画面

こんなときは・・・


●REGIUS MODEL 170が起動しない場合

1. 電源ブレーカーがONになっているか確認してください。
2. [operation] スwitchを押してください。

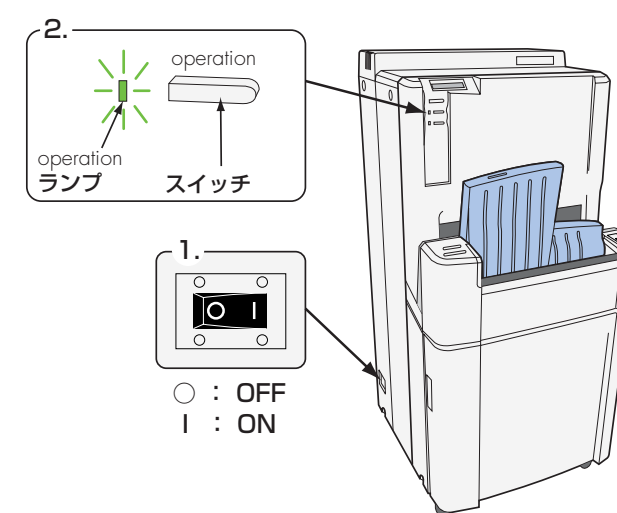

●CS-2操作部に何も表示されない場合

- ・電源ランプが青色に点灯しているか確認してください。

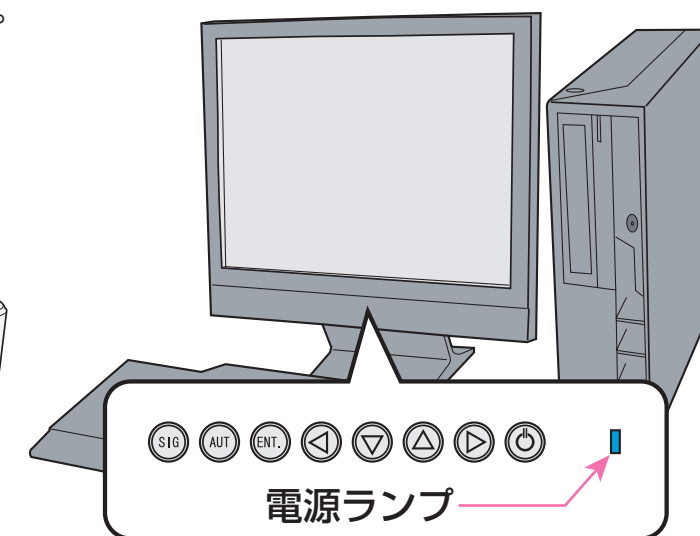




2 終了方法

1.[KONICA MINOLTA]ボタンをタッチします。


2.[システム終了]ボタンをタッチします。

3.[YES]ボタンをタッチします。

- ・数分後、電源が自動的にOFFになります。

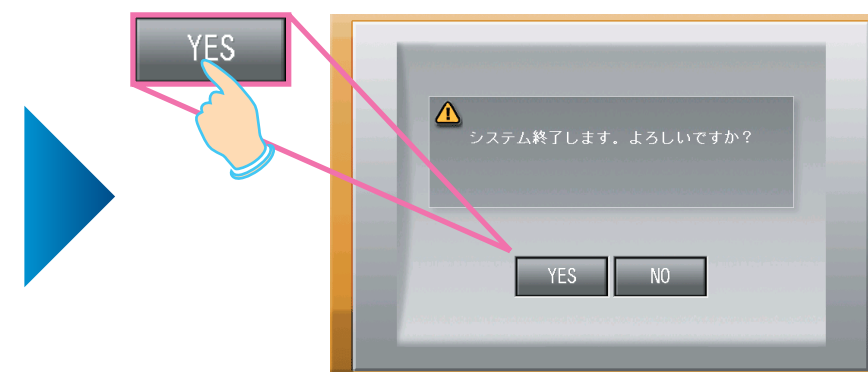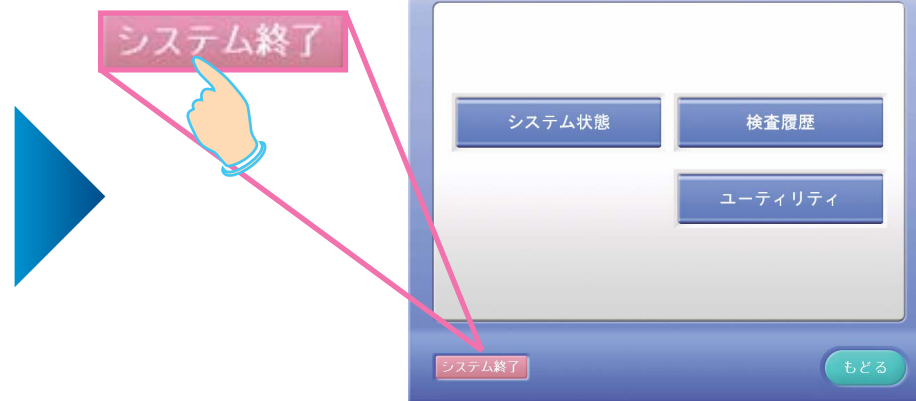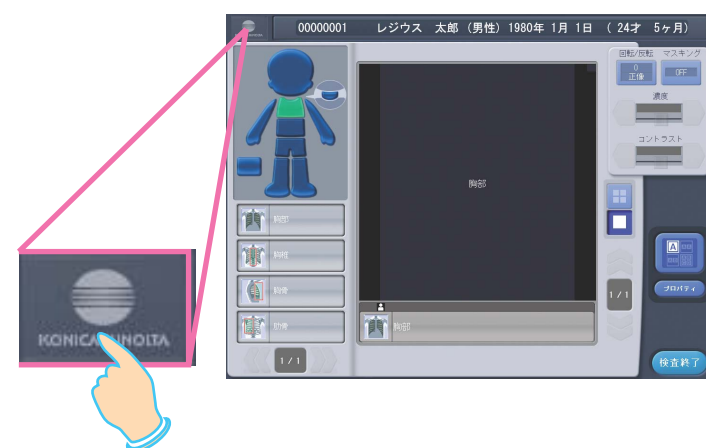

CS-2を終了すると、
パワーセーブモードに
なります。
([operation] ランプは緑色に点灯)

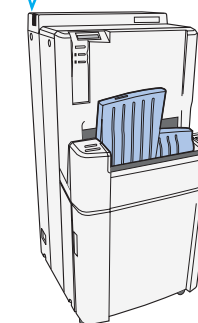

初期画面が撮影登録画面、または撮影リスト画面の場合、
[画面形式] ボタンが[システム状態] ボタンの下に表示されます。

電源ブレーカーはOFFにしないでください。