


1 起動方法

1. CS-3制御部の【電源】スイッチを押します。

- ・【電源】ランプが緑色に点灯します。
- ・数分後、CS-3操作部に初期画面（検査検索画面または検査リスト画面）が表示されます。

CS-3が起動すると、カセットリーダーや画像処理プロセッサも自動的に起動します。

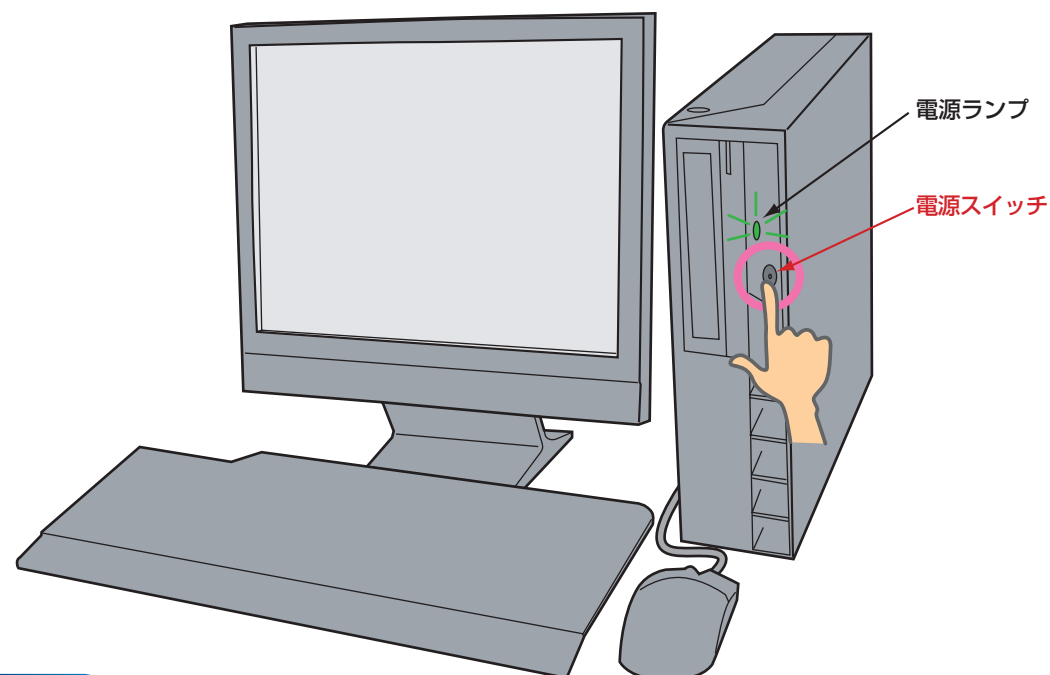




こんなときは・・・

●カセットリーダーが起動しない場合

1. 電源ブレーカーがONになっているか確認してください。
2. 【operation】スイッチを押してください。

●CS-3操作部に何も表示されない場合

- ・電源ランプが青色に点灯しているか確認してください。

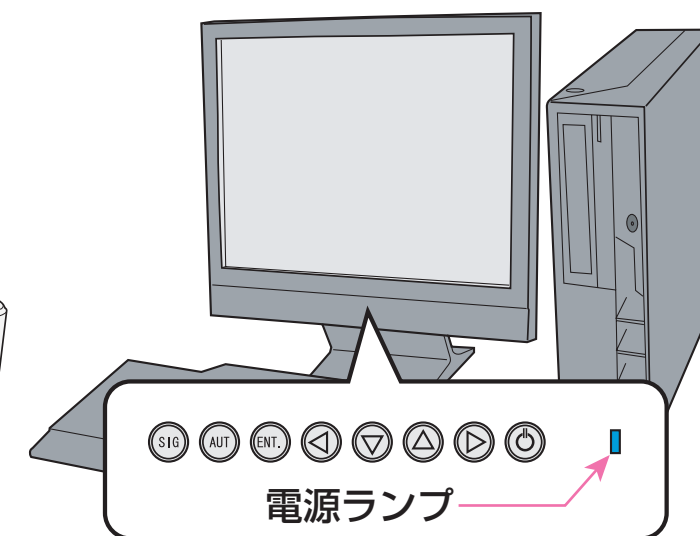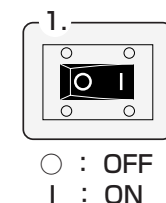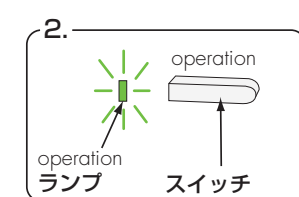


2 終了方法

1. [KONICAMINOLTA] ボタンをタッチします。




2. [システム終了] ボタンをタッチします。

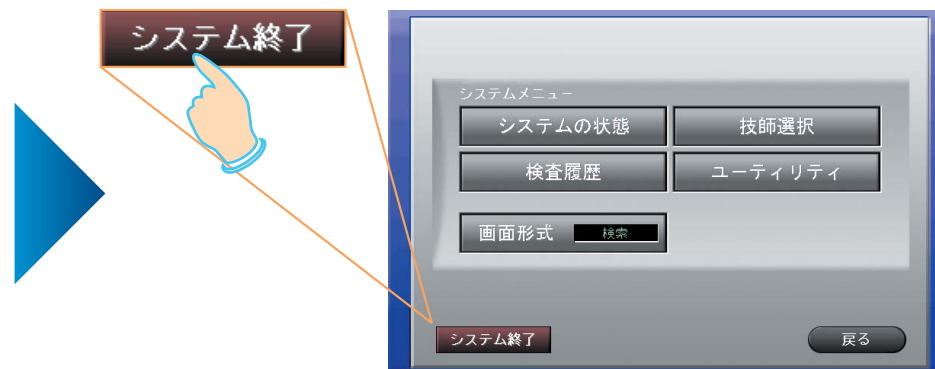


3. [YES] ボタンをタッチします。

- ・数分後、電源が自動的にOFFになります。

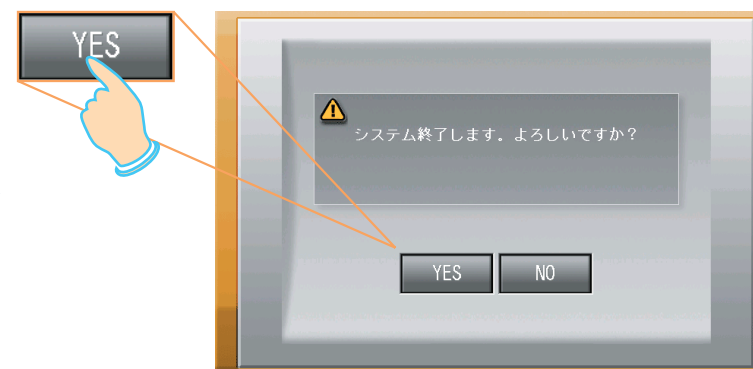

CS-3を終了すると、
パワーセーブモードに
なります。
([operation] ランプは緑色に点灯)

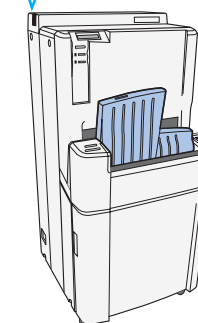

電源ブレーカーはOFFにしないでください。