


- 1 I-PACS EX Monitorを起動します。
「Monitor」画面クリックし、「サーバーモニター」を表示させます。

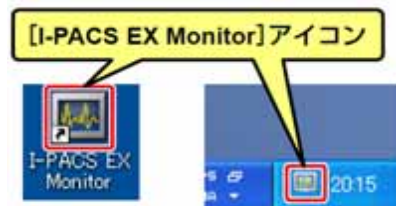

- 2 「サーバ終了」のボタンを押します。

注意！「サーバ終了」のボタンを押した後、
・データベースのメンテナンスを行う
・バックアップ連携を行う
などのメッセージが表示された場合
チェックボックスのチェックを外して
終了をしてください。




サーバー終了

- 1 I-PACS EX本体の電源ボタンを押します。



- 2 Windowsログイン画面が起動します。
パスワードを入力し、ログインします。

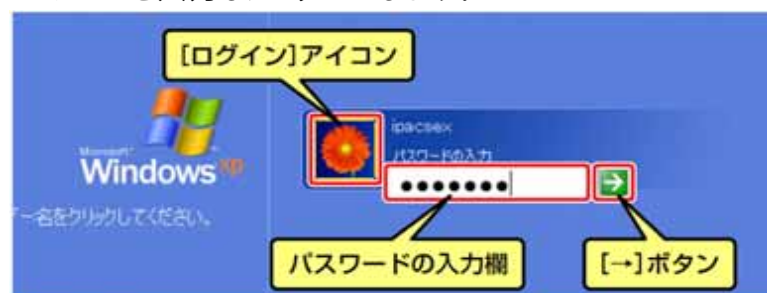

- 3 デスクトップ、またはタスクトレイにあるI-PACS EX Monitorのアイコンをクリックします。

