

【DRYPRO751/752】

設定方法

メンテナンスモードへの切り換え

A: タッチパネルの明るさ設定(光量設定)

B: タッチパネルのスリープモード設定

C: 熱現像ドラムのスリープモード設定

通常画面への切り換え


メンテナンスモードへの切り換え

4-2. メンテナンスモードの切り替え

■ メンテナンスモードの開始

- ① 通常画面で [ON/OFF LINE] キーをタッチして、オフラインに切り替えます。

画面左上の状態表示が「ON LINE」から「OFF LINE」に変わり、画面右下の [MAINTENANCE] キーが表示されます。

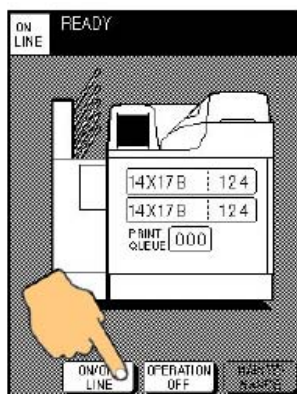


- ② [MAINTENANCE] キーをタッチします。

メンテナンス項目を一覧したメンテナンスメニュー画面 (MAINTENANCE) が表示されます。

注意

本機でプリント実行中に [MAINTENANCE] キーをタッチすると、“NOW PRINTING PLEASE WAIT” と表示され、そのプリントが終了するまでメンテナンスメニュー画面は表示されません。また、プリントキュー内に残っている未プリントのデータは、メンテナンスモード終了後にプリントされます。

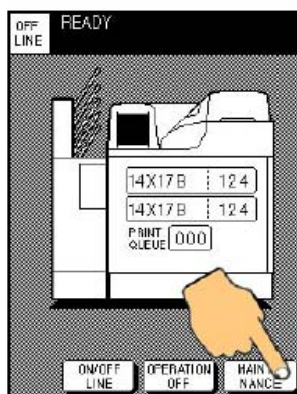

A:タッチパネルの明るさ設定(光量設定)

■ 操作パネルの調整 (PANEL ADJUST)


操作パネルのコントラストやバックライトの明るさを調整します。

また、操作パネルに表示されているキーと、画面を押してそのキーに反応する位置がずれているときは、タッチ位置の調整を行うこともできます。

- コントラスト、バックライトの明るさ調整

- ① メンテナンスメニュー画面の [PANEL ADJUST] キーをタッチします。

PANEL ADJUST画面が表示されます。

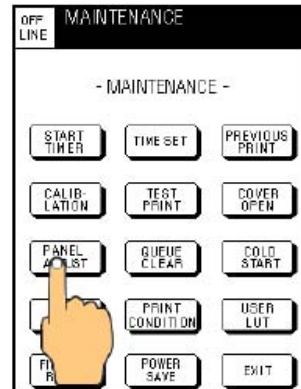


- ② 「LCD CONTRAST」の右の [▲] / [▼] キーをタッチすると、LCDのコントラストが調整できます。

コントラストは32段階で可変できます。見やすいレベルに調整してください。

- ③ 「BACK LIGHT」の右の [▲] / [▼] キーをタッチすると、バックライトの明るさが調整できます。バックライトは20段階で可変できます。見やすい明るさに調整してください。

- ④ 「EXIT」キーをタッチします。

メンテナンスメニュー画面に戻ります。

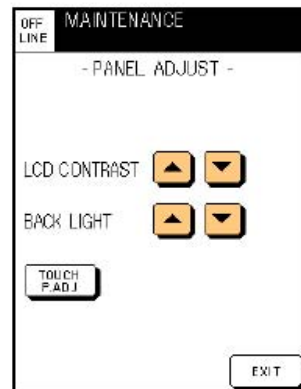

B:タッチパネルのスリープモード設定


■ 省電力モードの設定

DRYPRO には、一定時間プリントを行わないと自動的に消費電力を抑さえる省電力機能が備わっています。


省電力モードには、操作部のバックライトを減光する「TOUCH PANEL POWER SAVE」と、熱現像部の温度を下げる「HEAT ROLLER POWER SAVE」の2つの設定があります。

省電力モードの設定は、下記手順に従って操作してください。

- ① メンテナンスメニュー画面の [POWER SAVE] キーをタッチします。
省電力設定画面 (POWER SAVE) が表示されます。

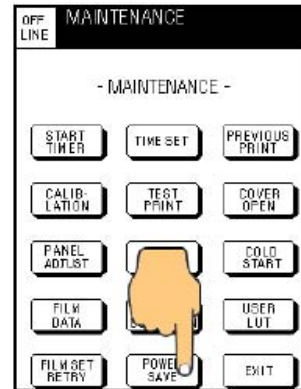

- ② 操作部のバックライトを減光させるには、「TOUCH PANEL POWER SAVE」の右の [ON] キーをタッチします。
- ③ 「TIMER」の右のキーをタッチしてから、画面下の数字キーをタッチして省電力モードになるまでの時間 (分) を設定します。

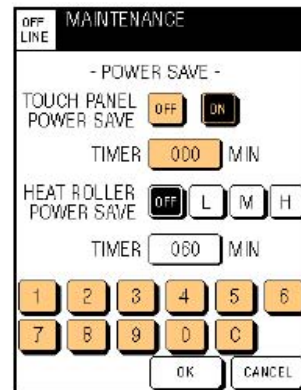


C: 熱現像ドラムのスリープモード設定

- ④ 熱現像部の消費電力をおさえるには、「HEAT ROLLER POWER SAVE」の右の[L]、[M]、または[H]キーをタッチします。

[L]、[M]、[H]は、省電力時の熱現像部の温度を表します。[L]が最も低く、[M]、[H]の順で高くなります。

注意

熱現像部の温度を低く設定すれば、それだけ省電力モード時の電力消費がおさえられますが、省電力モードから復帰してプリントが可能になるまでのウォームアップ時間が長くなります。復帰時間はそれぞれLは10分、Mは6分、Hは3分を目安に設定しています。

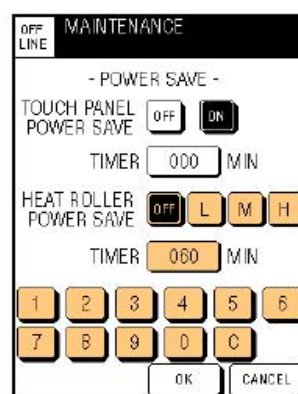

- ⑤ 「TIMER」の右のキーをタッチしてから、画面下の数字キーをタッチして省電力モードになるまでの時間(分)を設定します。
- ⑥ 全ての設定が終了したら[OK]キーをタッチします。
設定が登録され、メンテナンスメニュー画面に戻ります。
設定の登録を中止するには、[CANCEL]キーをタッチします。

通常画面への切り換え

■ メンテナンスモードの終了

メンテナンスメニュー画面で[EXIT]キーをタッチすると、メンテナンスモードを終了し、通常画面に戻ります。

- 通常画面に戻ったら、[ON/OFF LINE]キーをタッチしてオンライン状態に戻してください。
- PREVIOUS PRINT、CALIBRATION、およびTEST PRINTを設定した場合、そのプリントデータはメンテナンスモードを終了した時点でプリントが開始されます。