

【DRYPRO793】

設定方法

メンテナンスモードへの切り換え
A: タッチパネルの明るさ設定(光量設定)
B: タッチパネルのスリープモード設定
C: 熱現像ドラムのスリープモード設定
通常画面への切り換え

メンテナンスモードへの切り換え

メニューモードへの切り替えと操作

メニューモードへの切り換えと操作方法を説明します。



- 1 [メニュー]ボタンをタッチします。
・メニューモード画面が表示されます。

メンテナンスモードへの切り替え (ユーザーレベル権限を使用する場合)

メンテナンスモードへの切り換えと操作方法を説明します。

- 1 メニューモードへ切り換えます。
・メニューモード画面が表示されます。




- 2 [メンテナンス]ボタンをタッチします。
・ユーザー選択画面が表示されます。



3 スクロールボタンで改ページして、メンテナンスモードを使用するユーザー名のボタンをタッチします。

- ・パスワード入力画面が表示されます。
- ・[戻る]ボタンをタッチすると、メニューモード画面に戻ります。

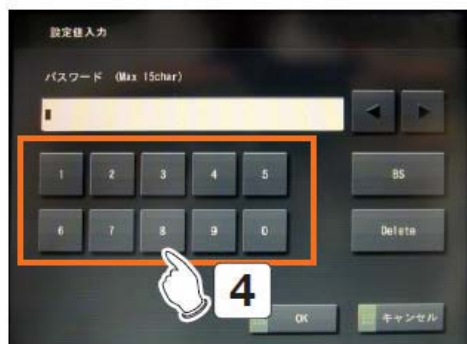

4 画面上のテンキーでパスワードを入力します。

- ・入力したパスワードは、「*」（アスタリスク）で表示されます。



5 [OK]ボタンをタッチします。

- ・入力したパスワードが正しい場合、メンテナンスモード画面が表示されます。
- ・入力したパスワードに誤りがある場合、パスワードが間違っている事を示すメッセージが表示されます。正しいパスワードを入力し直してください。

※パスワードの初期値は「1234」です。



A:タッチパネルの明るさ設定(光量設定)

1 メンテナンスモードに切り換えます。

2 メンテナンス画面の[その他の設定]ボタンをタッチします。



3 [タッチパネル設定] ボタンをタッチします。

・タッチパネル設定画面が表示されます。

・[戻る]ボタンをタッチすると、メンテナンスモードを終了して通常画面に戻ります。



4 左右矢印[◀][▶]ボタンをタッチして、バックライト光量を選択します。

・1から5までの範囲で選択します。

値が大きいほど明るく、小さいほど暗くなります。

"1" : 光量70%

"2" : 光量75%

"3" : 光量80%

"4" : 光量85%

"5" : 光量90%

・左右矢印[◀][▶]ボタンをタッチするごとに、光量を示す数値は上下します。



バックライト光量の左右矢印[◀][▶]ボタンがタッチされると、同時に操作パネルのバックライトの光量が変わります。

実際に値を上下させて、好みの光量を選択してください。

B:タッチパネルのスリープモード設定

1 メンテナンスモードに切り換えます。

2 メンテナンス画面の[その他の設定]ボタンをタッチします。

3 [スリープモード設定] ボタンをタッチします。
・スリープモード設定画面が表示されます。

・[戻る]ボタンをタッチすると、メンテナンスモードを終了して通常画面に戻ります。



4 タッチパネルのスリープモードを使用するか否かを、[ON]ボタン（使用）または[OFF]ボタン（使用しない）から選択します。

・選択されたボタンは白色になります。



5 手順5で[ON]を選択した場合、タッチパネルのスリープモードを開始するまでの時間（分）を設定するために、[(分)]ボタンをタッチします。

・数値入力画面が表示されます。



6 タッチパネルのスリープモードを開始するまでの時間（分）を入力します。

・1分から240分（4時間）までの範囲で設定します。


・「タッチパネル タイマー」の初期値は60分です。

7 [OK]ボタンをタッチします。

・スリープモード設定画面に戻ります。



C: 熱現像ドラムのスリープモード設定

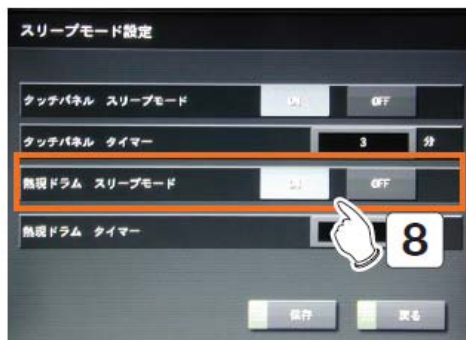

8 熱現ドラムのスリープモードを使用するか否かを、[ON]ボタン（使用）または[OFF]ボタン（使用しない）から選択します。

・選択されたボタンは白色になります。



9 手順5で[ON]を選択した場合、熱現ドラムのスリープモードを開始するまでの時間（分）を設定するために、[(分)]ボタンをタッチします。

・数値入力画面が表示されます。




10 熱現ドラムのスリープモードを開始するまでの時間（分）を入力します。

・1分から720分（12時間）までの範囲で設定します。

・「熱現ドラム タイマー」の初期値は120分です。

11 [OK]ボタンをタッチします。

・スリープモード設定画面に戻ります。

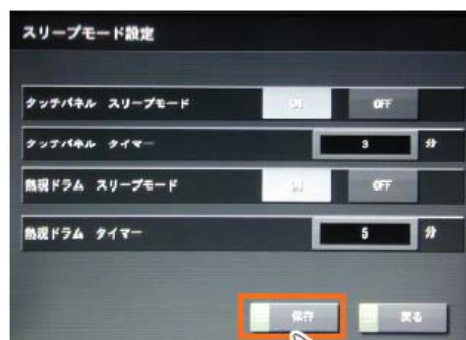

12 [保存]ボタンをタッチします。

・設定が保存され、メンテナンスモード（その他の設定）画面に戻ります。



通常画面への切り換え

メンテナンスモードから通常画面への切り替え

メンテナンスモードから通常画面への切り換え方法を説明します。



- 1 [戻る]ボタンをタッチします。
・通常画面に戻ります。